
## SFTSウイルスPCR検査採取・発送方法

※都合により、検査キットは変更になる場合が有ります。



C:採取容器(ウイルス失活用薬剤入り)

E:ジッパー付き袋 F:緩衝材袋 G:段ボール H:発送伝票

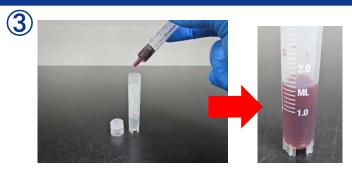

C:採取容器の蓋を開けて取り外し、採血した 全血を0.5ml入れてください

※中の液体は絶対にこぼさないようにご注意下さい※



検体の準備が終わったら 検体名を記載してください


※こちらに記載してあるものが検査報告書に載ります



B:プラ容器に入れたC:採取容器をE:ジッパー付き袋、

F:緩衝材袋の順に入れてください



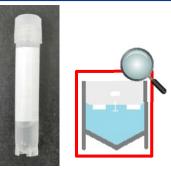

c:採取容器(ウイルス失活用薬剤入り)に 1mLのラインまでウイルス失活用薬剤が 入っていることをご確認ください





蓋をしっかりと(軽く傾けてこぼれないか確認) 回して閉め、血液とウイルス失活用薬剤が 混ざるように激しく振盪してください。



D:吸水紙で検体を採取したC:採取容器を包んでください それをB:プラ容器に収納してください







裏面に記載してある段ボールの組み立て方法を参考に箱を 作成し、A:依頼書、緩衝材に包んだC:採取容器を梱包して ください

1:送り状を利用して『ゆうパック』にて郵便局から発送をしてく ださい(常温で大丈夫です)。送り状には発送元連絡先、配達 希望日のみを記載してください。(品名、摘要欄は、事前に 記載されているままご利用ください)

※検体の送付料金はお客様のご負担となります

※発送した際、本社へ到着予定日時のご連絡を


よろしくお願い申し上げます※

## 段ボール組み立て方法

6





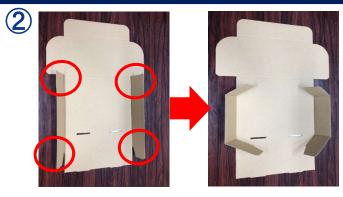


4つの赤丸の部分を内側に折り込んでください



赤丸内を山折りしてください



赤丸内を中に折り込んでください

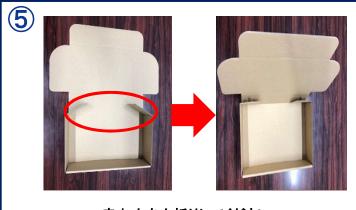

赤丸内を山折りしてください



赤丸内を山折りして箱内に折り込んでください



## 完成 ガムテープでしっかり梱包してください

