

# 新型コロナウイルス唾液PCR検査採取・発送方法


※都合により、検査キットは変更になる場合があります。



検査キットを確認してください

A: 依頼書 B: バーコードシール C: 唾液コレクター  
D: 採取容器(ウイルス失活用薬剤入り) E: 吸水紙  
F: ジッパー付き袋 G: 緩衝材袋  
H: 発送伝票 I: 返送用段ボール


②

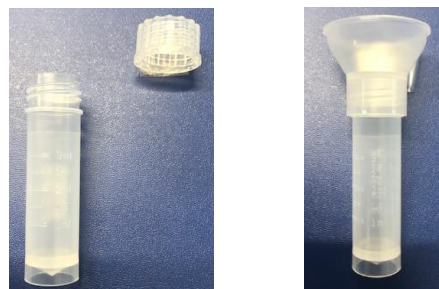

D: 採取容器の蓋を開けて取り外し、  
C: 唾液コレクターを取り付けてください


※中の液体は絶対にこぼさないようにご注意ください※

③

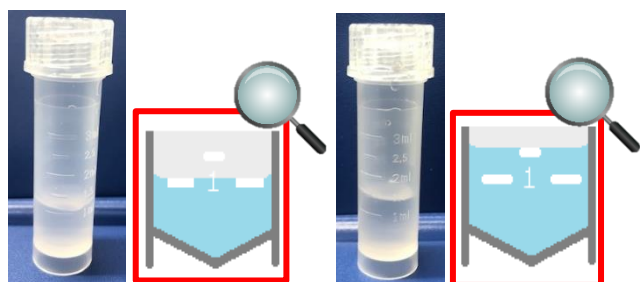

1mLのラインまでウイルス失活用薬剤が入っているため、その上のラインになるように唾液を採取してください

④

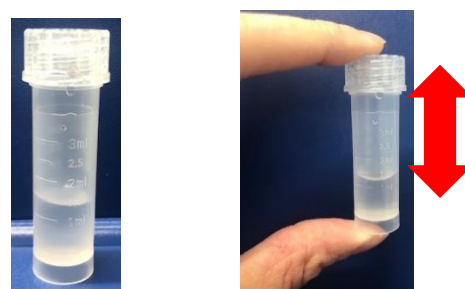

蓋をしっかりと(軽く傾けてこぼれないか確認)回して閉め、転倒させながら唾液とウイルス失活用薬剤が混ざるようにしっかりと振り、混ぜてください。

⑤




検体の準備が終わったら  
B: バーコードシールを  
D: 採取容器に  
巻き付けてください

注意



上記のアイテムは  
お客様の地域の  
ルールに従って  
お客様の方で  
廃棄してください。  
(プラスチックごみ)

⑥

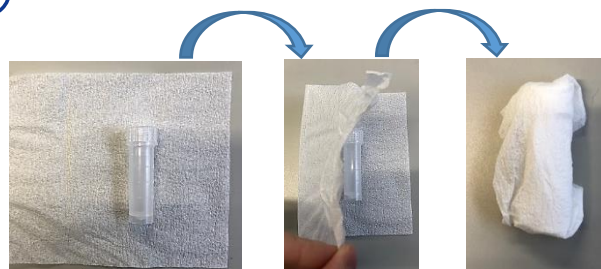

検体を採取したD: 採取容器をE: 吸水紙で包んでください

⑦



包んだD: 採取容器をF: ジッパー付き袋、  
G: 緩衝材袋の順に入れてください

⑧



ご返送の際は、A: 依頼書、緩衝材に包んだD: 採取容器を梱包してください


H: 送り状を利用して『ゆうパック』にて郵便局から発送をしてください(常温で大丈夫です)。送り状には発送元連絡先、配達希望日のみを記載してください。(品名、摘要欄は、事前に記載されているままご利用ください)

※検体の送付料金はお客様のご負担となります

※発送した際、本社へ到着予定日時のご連絡を  
よろしくお願い申し上げます※


# 段ボール組み立て方法

①

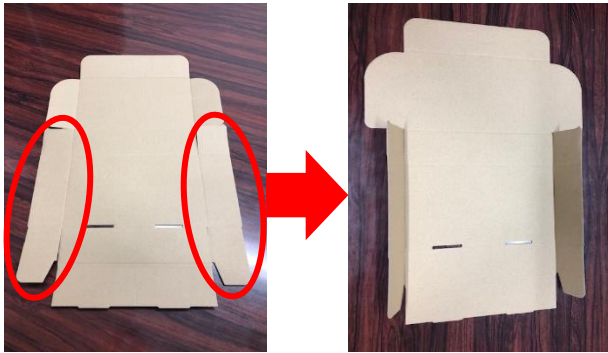


赤丸内の左右を山折りしてください

②

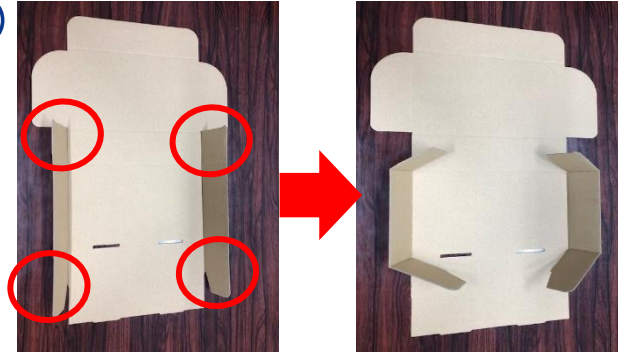


4つの赤丸の部分を内側に折り込んでください

③

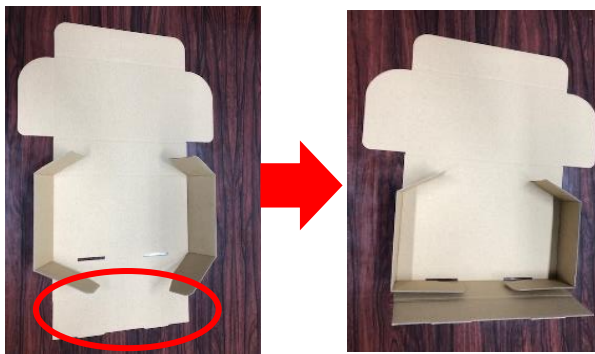


赤丸内を山折りしてください

④

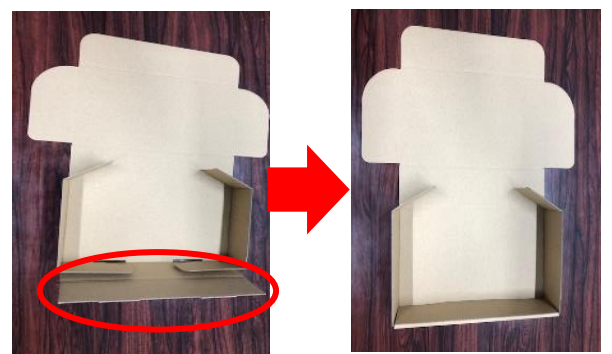

赤丸内を中に折り込んでください

⑤

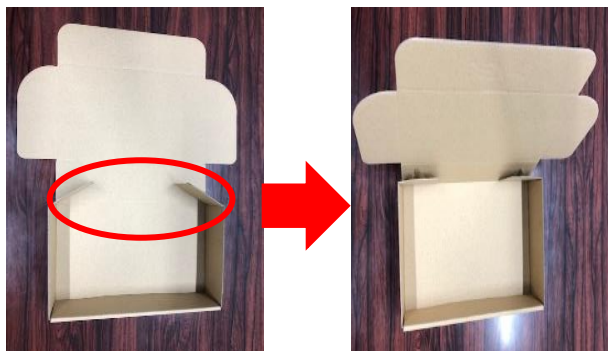

赤丸内を山折りしてください

⑥



赤丸内を山折りして箱内に折り込んでください

⑦

## 完成

ガムテープでしっかり梱包してください

